


PERFECT HEAD MAXI



Dispositivo medico
Classe 1

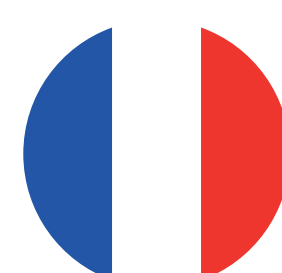

Qui nous sommes

Koala Babycare naît au début de 2017 par deux jeunes pères Ingénieurs passionnés d'Entreprise et d'Innovation qui ont conçu deux oreillers pour la prévention et le soin de la plagiocéphalie : **Koala Perfect Head** et **Koala Perfect Head Maxi**.

Les coussins ont été conçus sur la base d'une analyse attentive des besoins des parents et des solutions déjà présentes sur le marché, dans le but de réaliser des aides optimales pour la prévention et le traitement de la Plagiocéphalie. La structure des deux versions du **Koala Perfect Head** a été conçue pour accueillir la tête du bébé doucement mais efficacement, et pour être en même temps anti-suffocation, grâce à sa configuration perforée. Cela permet à l'enfant et aux parents de se reposer tranquillement.

La conception des oreillers, unique en son genre, a été **brevetée** et a obtenu le **marquage CE** en tant que **Dispositif Médical de Classe I**, ce qui témoigne de la valeur de ses caractéristiques. Les matériaux de fabrication ont également été choisis avec le plus grand soin : les deux coussins sont réalisés en **mousse à mémoire BASF** de très haute qualité, tandis que la taie d'oreiller en coton s'avère transpirante et douce.

Ce **manuel** contient de petites suggestions pour une utilisation pratique, correcte et sûre de l'oreiller et des conseils précieux pour le positionnement de votre bébé.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à :

info@koalababycare.com

Nous saurons vous aider et vous conseiller avec la plus grande gentillesse et disponibilité !

La Plagiocéphalie positionnelle

Le Plagiocéphalie positionnelle est un syndrome encore peu connu, bien que son incidence ait fortement augmenté depuis que, en 1992, les lignes directrices contre le SIDS ont suggéré de faire dormir les bébés sur le dos.

Les os du crâne sont très faiblement liés les premiers mois de la vie. Pour cette raison, si une pression est appliquée de façon prolongée sur le même point du crâne, les os peuvent se déplacer. Ce phénomène est appelé Plagiocéphalie.

Cette situation peut se vérifier, par exemple, si votre enfant dort dans la même position chaque nuit et pendant les siestes. La position couchante, qui est la plus sûre selon le SIDS, peut donc, si elle est maintenue pendant une longue période, entraîner un aplatissement du crâne.

Connaître le problème est fondamental pour le diagnostiquer en temps utile et engager une action corrective, en prévenant l'aggravation de la condition et en améliorant le bien-être de l'enfant.

Les médecins et les pédiatres sont le premier point de référence des nouveaux parents, c'est pourquoi il est essentiel qu'ils soient bien informés sur la plagiocéphalie et sur la façon de la traiter de manière non invasive.

Quand est-ce que la plagiocéphalie positionnelle peut se produire?

- Les causes peuvent être liées à l'accouchement, comme par exemple un accouchement jumeau ou un très grand enfant qui se déplace peu à l'intérieur du ventre.
- Il peut également se produire après la naissance en raison de l'apparition de différents comportements, comme par exemple un entretien excessif du nouveau-né pendant trop d'heures dans la même position, ou lorsque l'enfant préfère garder la petite tête tournée toujours dans une direction en développant ainsi un torticolis.

Si vous remarquez une légère déformation dans la tête de votre enfant, parlez-en immédiatement avec votre pédiatre.

Koala Perfect Head Maxi


Koala Perfect Head Maxi (taille L) peut être utilisé dès le premier mois jusqu'à l'âge de 36 mois. Il est très large (50cm) et il est conçu pour être utilisé dans le lit. Les enfants en pleine croissance commenceront de plus en plus à bouger pendant le sommeil (surtout pendant la nuit quand le sommeil est prolongé). **Koala Perfect Head Maxi**, grâce à sa taille, permet de garder la tête du bébé sur le coussin malgré les mouvements.

Comment utiliser Koala Perfect Head Maxi?


Comme recommandé par les pédiatres, la meilleure position est la position couchée sur le dos, c'est-à-dire le visage tourné vers le haut.

Koala Perfect Head Maxi n'a pas un trou, comme le petit frère Koala Perfect Head, mais un léger creux au centre. De cette façon, le confort de l'enfant est assuré en garantissant la liberté de déplacement pendant le sommeil prolongé.

5


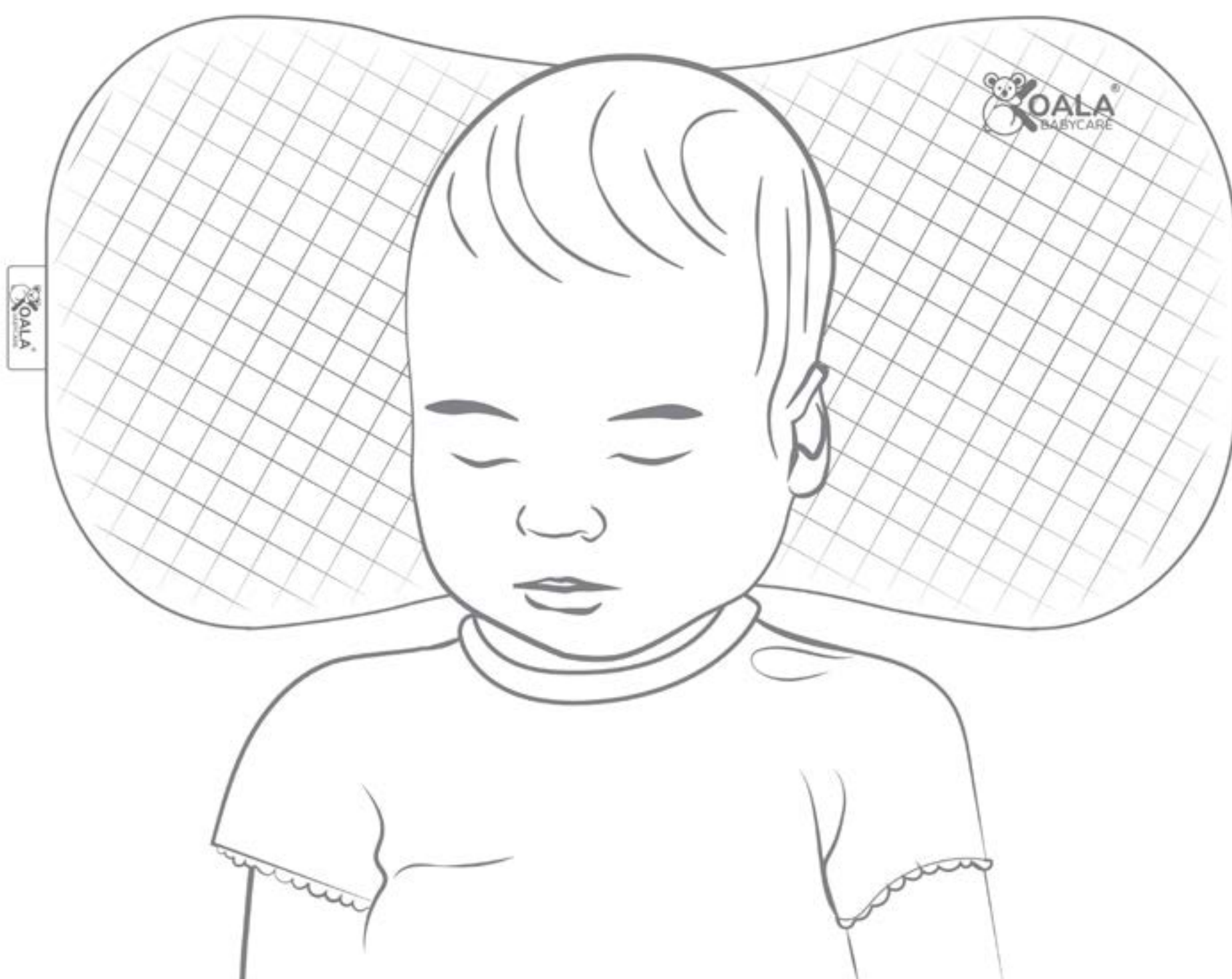


Et si l'enfant se déplace pendant son sommeil de la zone centrale de l'oreiller, pas de problème ! La qualité de la mousse à mémoire garantit une répartition optimale des pressions du crâne, même à l'extérieur de la cuve.

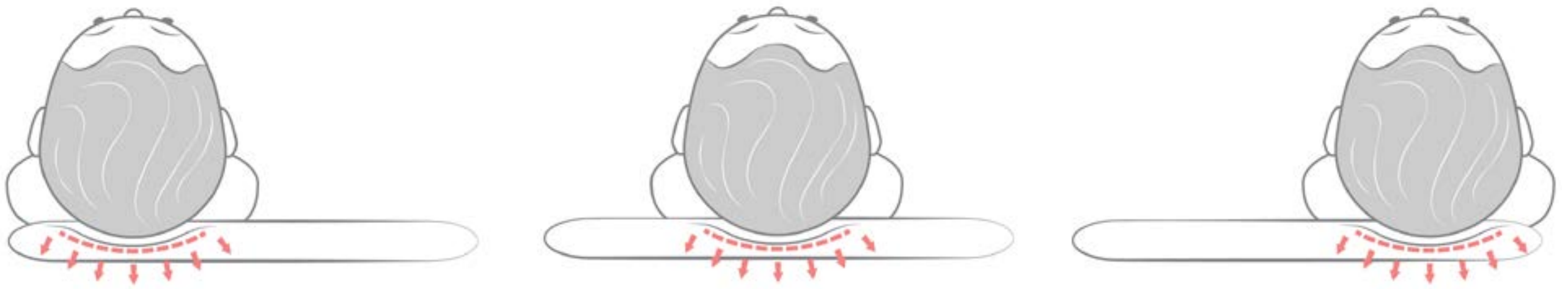

Les épaules de l'enfant ne doivent pas reposer sur le coussin, cela permet de maintenir la courbure naturelle du dos et de la cervicale et assure que la nuque est centrée au centre du coussin.

Si l'enfant a une plagiocéphalie latérale, nous vous suggérons de le placer du côté opposé à celui frappé par la plagiocéphalie ou de placer l'enfant face au haut.

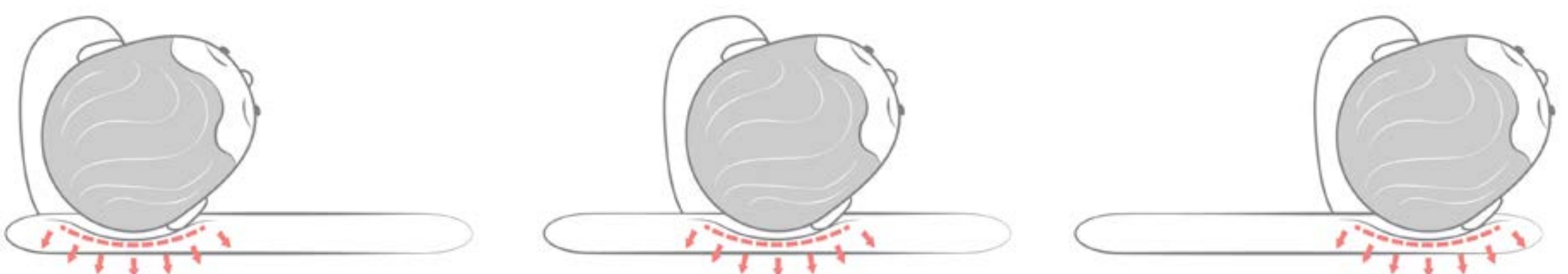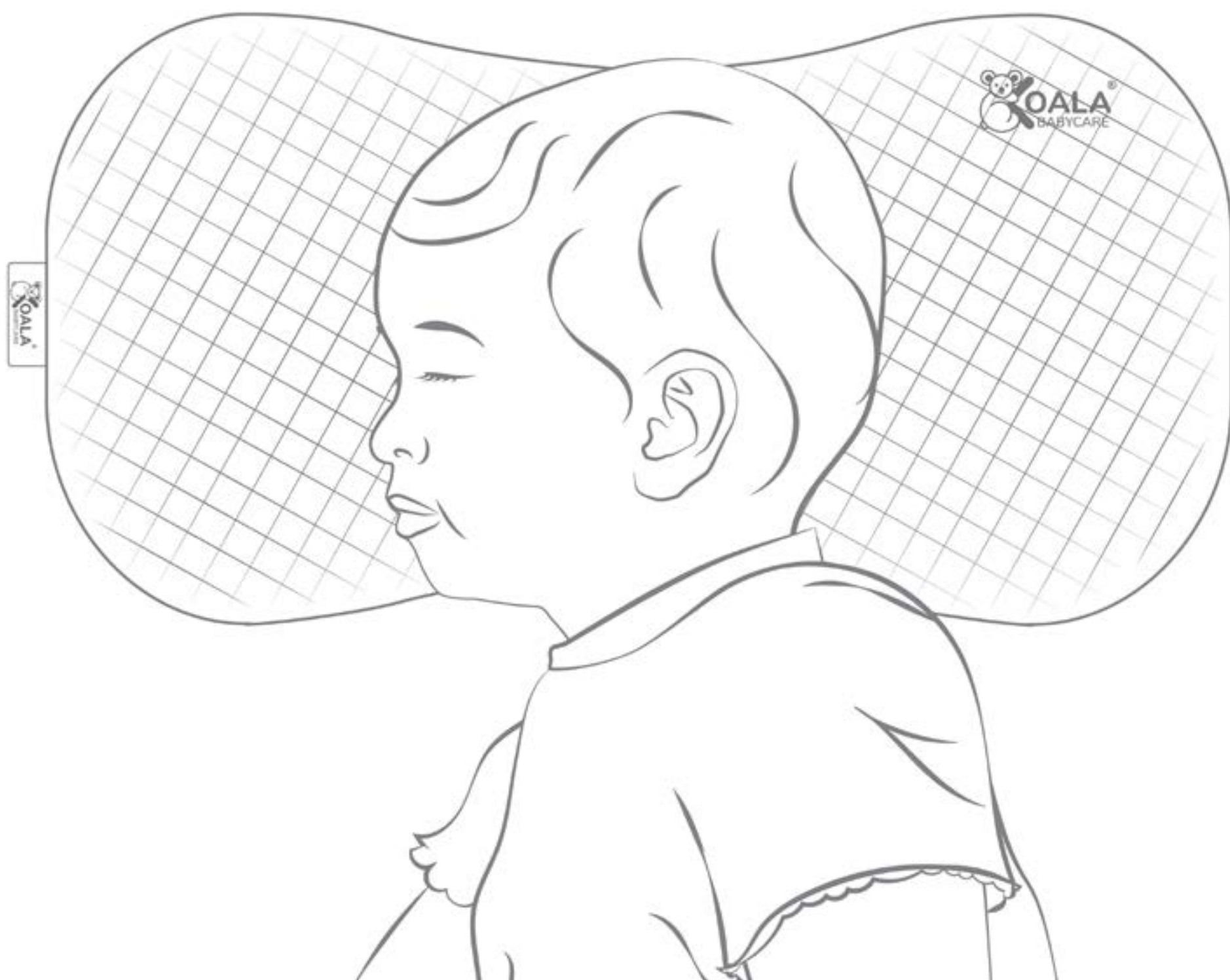

Que puis-je faire d'autre pour combattre la Plagiocéphalie?

Afin de maximiser l'efficacité du produit, nous recommandons d'utiliser **Koala Perfect Head** associé à **Koala Perfect Head Maxi** dès les premiers mois de vie du bébé. C'est parce que plus de temps d'utilisation garantit une meilleure prévention et soin de la plagiocéphalie.

Koala Perfect Head Maxi maintient la structure pratique, confortable et anti-suffocation mais est spécialement conçu pour être utilisé dans le lit. Sa largeur (50 cm) permet à la tête de l'enfant de ne pas glisser de l'oreiller, même à la suite de mouvements pendant le sommeil. En raison de l'épaisseur réduite dans la zone cervicale, il peut être utilisé de la naissance jusqu'à 36 mois.

En utilisant les deux coussins pendant les différents moments de la journée, vous augmenterez considérablement l'efficacité de la prévention et du traitement de la plagiocéphalie.

A notre oreiller vous pourrez associer ces habitudes simples:

- Quand vous changez votre bébé, attirez son attention avec un jeu afin qu'il déplace sa tête à droite et à gauche
- Tenez votre bébé dans vos bras autant que possible
- Privilégiez l'utilisation d'une bande ou d'un porte-bébé
- Dans le berceau et dans le parc bébé, changez la position de ses jeux pendant la journée afin de le faire tourner avec sa tête dans des positions différentes
- Utilisez un coussin d'allaitement pour que votre bébé n'appuie pas directement sur votre bras.
- Votre enfant tournera toujours dans votre direction, donc s' il dort dans votre chambre, alternez la position de la poussette, de sorte qu'il ne tourne pas toujours du même côté.
- Si possible, tenez-le le moins possible dans vos berceaux, poussettes et chaises longues - Du 2^o mois et seulement si éveillé et surveillé, placez-le de temps en temps sur le ventre en dessous, en l'incitant à garder la tête droite.

Cómo lavar Koala Perfect Head

Ne laver jamais la Mousse à Mémoire (l'oreiller intérieur) !
Si vous plongez dans l'eau la Mousse à mémoire l'absorbera en perdant sa forme et en devenant par conséquent totalement **inutilisable**.

Si vous voulez laver l'oreiller intérieur, vous pouvez mouiller un chiffon de coton dans de l'eau tiède (éventuellement avec l'ajout d'une goutte de savon doux) et nettoyer les taches avec des gestes doux **sans exercer trop de pression**. Laisser ensuite sécher dans une zone très aérée en gardant toujours la position horizontale, **jamais suspendu**.

Voici quelques indications pour le lavage des taies:

- Température maximale : 30°C. Si les taies d'oreiller sont particulièrement sales, vous pouvez les laver jusqu'à 40°. Cependant nous ne garantissons pas que le coton résiste à l'infini avec des lavages à cette température.
- Ne pas jaillir.
- Ne pas repasser
- Ne pas nettoyer à sec, ne pas utiliser de détachants avec des solvants.

De quoi est fait Koala Perfect Head Maxi?

- Dimensiones: 50 x 25,5 x 3 cm
- Forro: 75% Algodón, 25% Polyester
- Almohada: 100% Memory Foam



Merci à nouveau pour votre confiance en nos produits

J'espère que ce petit mode d'emploi vous a aidé.

Avant de vous laisser, je voudrais vous demander un petit service: comment pourriez-vous voir nous mettons notre cœur dans ce projet. La seule façon dont nous pouvons informer tous les nouveaux pères et nouvelles mères de l'engagement que nous mettons en notre travail et la qualité de notre produit sont les commentaires sur Amazon.

Je ne sais pas si vous avez déjà laissé un commentaire sur Amazon, mais cela ne vous prendra que deux minutes. Ces deux minutes, pour moi, auraient une très grande signification parce que ils aideraient beaucoup d'autre personnes avec le choix du meilleur oreiller pour ces enfants.

Vous pouvez laisser un commentaire sur Amazon.

1. Accédez à Amazon dans la section : **“Votre Compte”** et **“Vos commandes”**.
2. A côté de votre achat **Koala Babycare**, vous trouverez: **“Donnez votre avis sur le produit”**

11

Ces deux minutes, pour moi, auraient une très grande signification parce que ils aideraient beaucoup d'autre personnes avec le choix du meilleur oreiller pour ces enfants.

Si vous décidez de laisser un commentaire je vous serai infiniment reconnaissant.

Je vous souhaite tout le meilleur pour votre petit(e)!

**Je vous adresse mes meilleurs vœux,
Giacomo
Koala Babycare**

Rejoignez-vous la Community
de Koala Babycare!



Inscrivez-vous à notre communauté,
vous obtiendrez jusqu'à **20% de réduction**
pour l'achat de produits Koala Babycare!
Qu'attendez vous?

<https://koalababycare.com/koala-family>